



# Sicherheit bei jedem Schritt

## CareMat

Die druckempfindliche Sensormatte für die Pflege.



# Alltagserleichterung in der Pflege

In Pflegeeinrichtungen leistet die CareMat einen wesentlichen Beitrag zur **Erhaltung der Lebensqualität** der Bewohner:innen und bietet zudem eine wertvolle **Unterstützung für das Pflegepersonal**.

Die CareMat wird einfach vor dem **Bett** oder der **Zimmertüre** positioniert und per **Kabel oder Funk** entweder an die **Rufanlage des Hauses** oder an einen **Steckdosen-Funkempfänger** angeschlossen.

1



Menschen mit Demenz neigen zu Unruhe und Orientierungslosigkeit. Sie versuchen häufig **ohne fremde Hilfe aufzustehen**.

2



In diesem Fall bietet die **CareMat** zuverlässigen Schutz. Das Betreten der CareMat löst entweder das **Rufsignal** der **Lichtrufanlage** des Hauses oder ein **optisches bzw. akustisches Signal** des **Steckdosenempfängers** aus. Das Pflegepersonal kann rasch Hilfe leisten.

3



Die CareMat **erleichtert die Arbeit** für das Pflegepersonal und **erhöht die Sicherheit** für den Patienten. Stürze können vermieden und das unbeaufsichtigte Verlassen der Räumlichkeit verhindert werden.

4



Die CareMat ist **Ihr zuverlässiger Partner** zur Unterstützung von Pflegepersonal und Bewohner.



## CareMat Anwendung

Die **Pflege dementer und sturz- oder weglaufgefährdeter Personen** stellt eine große Herausforderung an die Betreuenden dar. Dabei liegt das Augenmerk darauf, die Bewegungsfreiheit der Pflegebedürftigen nicht unnötig einzuschränken.

Die **druckempfindliche Sensormatte CareMat** bietet dabei eine wichtige Unterstützung.

### Anwendungsgebiete

- Senioren- & Pflegeheime
- Krankenhäuser & Kliniken
- Psychiatrien
- Betreute Wohngemeinschaften
- Häusliche Betreuung

### Einfache Installation

- Anschluss an die Rufanlage des Hauses
- Anschluss an einen Steckdosenempfänger
- Platzierung vor dem Bett oder der Zimmertüre

### Eigenschaften

- Zuverlässiger Alarmgeber
- Mobil einsetzbar
- Rutschsichere Oberfläche
- Hygienesicheres Material
- Langlebige Bauweise

### Vorteile für Pflegende

- Vermeidung von Stürzen
- Rasche Hilfeleistung
- Reduktion nächtlicher Kontrollgänge
- Geringe Folgekosten
- Einfache Handhabung

### Vorteile für Patienten


- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- Gefühl der Sicherheit
- Verbesserung der Lebensqualität

## Technische Daten

Die CareMat kann vor dem Pflegebett oder der Tür eingesetzt werden und ist als Kabel- oder Funkausführung erhältlich.

**Neu: Der Funksendereinsatz ist jetzt noch einfacher auswechselbar!**

Einfach den magnetischen Funksendereinsatz aus der Verankerung ziehen. Die Funkplatine lässt sich seitlich verschieben und die Batterie somit schraublos austauschen.

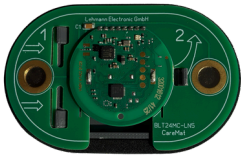

**CareMat A**



**CareMat B**



**CareMat C**

**Maße**

**CareMat A** - 1.100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg

**CareMat B** - 700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg

**CareMat C** - 1.100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg

**Material**

Polyurethan

**Oberfläche**

Noppenstruktur

**Farbe**

Careyellow, Caregrey

**Kontaktausgang**

**Kabel:** Arbeits- oder Ruhekontakt, Widerstandsbeschaltung

**Funk:** Herstellerspezifisches Funkprotokoll  
Wird von Ihrem Bezugspartner passend zu Ihrer Rufanlage konfektioniert.

**Anbindung**

## Ihr CareMat Distributor

meta-care ist Ihr europaweiter Distributor für technisch-medizinisches Zubehör im Pflege- und Gesundheitsbereich.

Wir bieten ein umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Pflegesituationen und sind Ihr kompetenter Partner rund um das Pflegebett. Mit meta-care setzen Sie auf Qualität, Sicherheit und praxisnahe Innovationen.

## meta-care GmbH

T: +43 5 1721 0

E: office@meta-care.eu

W: www.meta-care.eu

Akazienhofstraße 20  
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Österreich